



FREMAM

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

MASCARETES QUIRÚRGICOS

PRODUCTE SANITARI UNE-EN 14683

Reduixen l'emissió d'agents infecciosos des del nas i la boca d'un portador asintomàtic o d'un pacient amb símptomes clínics

Protecció de dins cap a fora



COL.LOCACIÓ

1. Llava't les mans abans de col·locar-te la mascareta quirúrgica
2. Segueix les recomanacions del fabricant.



La part acolorida ha de mantindre's com a cara externa



En cas de mascaretes amb cordons i no amb gomes: assegurar els cordons per darrere del cap, una a l'altura de la nuca i l'altra a la meitat posterior del coll.



Ajusta't la mascareta quirúrgica allò més pegada a la cara, cobrint nas i boca

RETIRADA



La retirada s'efectua des de les cintes o les gomes, mai es deu tocar la part externa de la mascareta.

RECORDA

Desfés-te després del seu ús i diposita-la al contenidor adequat i higienitza les teues mans

