



MASCARETES AUTOFILTRANTS

EN 149:2001


EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Eviten la inhalació d'aerosols que poden contenir agents biològics perillosos

Protecció de fora cap a dins



COL·LOCACIÓ I AJUST

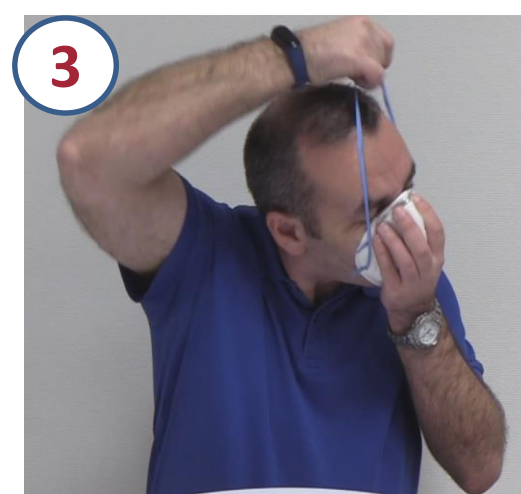

1	Abans de posar-te una mascareta, desinfecta't correctament les mans i recorda que la cara ha d'estar neta, seca i sense pèl facial a la zona de contacte Subjecta la mascareta amb les cintes penjant cap avall
2	Subjecta la mascareta amb una mà. Col·loca-la per sota la barbata i per sobre el nas
3	Subjecta la mascareta amb una mà i amb l'altra col·loca les gomes elàstiques
4	Col·loca la goma superior a l'alçada de la coroneta i la inferior a l'alçada del clatell
5	Si en disposa, pressiona el clip d'ajust amb les dues mans fins que s'adapti bé al pont nasal
6	Realitza la comprovació d'ajust i estanqueïtat cobrint la mascareta amb les mans i exhalant amb força. Si detectes fuites d'aire entre la cara i la mascareta, torna-la a ajustar



MASCARETES AUTOFILTRANTS

EN 149:2001

EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL



Eviten la inhalació d'aerosols que poden contenir agents biològics perillosos



Protecció de fora cap a dins



RETIRADA

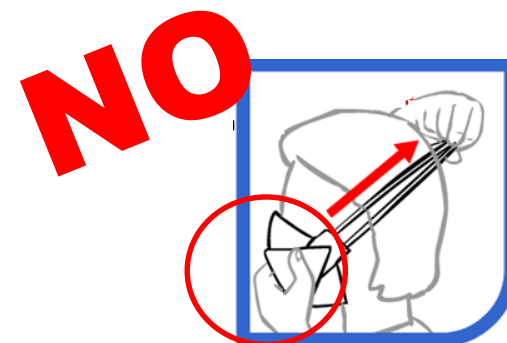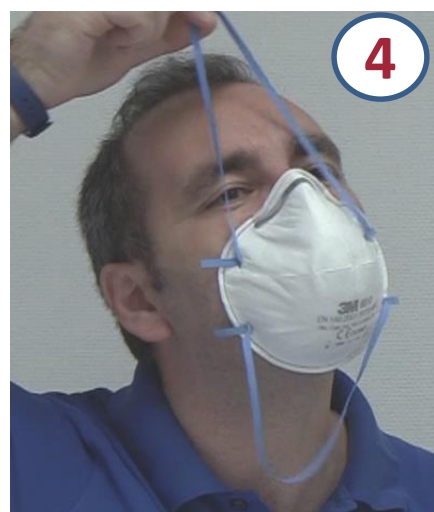

**NO TOQUIS
LA PEÇA FACIAL!**

1	En primer lloc treu la goma inferior situada al clatell
2	Passa la primera goma (inferior) per davant de la cara
3	Treu la segona goma col·locada a la coroneta
4	Passar la segona goma per davant de la cara. No s'ha de tocar la peça facial en cap moment i es rebutja com a residu contaminat
5	Realitza una correcta higiene de les mans