



MÁSCARAS CIRÚRXCICAS



PRODUTO SANITARIO UNE-EN 14683

Reducen a emisión de axentes infecciosos dende o nariz e a boca dun portador asintomático ou dun doente con síntomas clínicos

Protección de dentro cara a fóra



COLOCACIÓN

1. Lava as mans antes de colocar a máscara cirúrxica
2. Segue as recomendacións do fabricante.



A parte coloreada debe manterse como cara externa



No caso de máscaras con cordóns e non con gomas: asegurar os cordóns por detrás da cabeza, un á altura da noca e outro na metade posterior da cabeza.



Axusta a máscara cirúrxica o máis pegado á cara, cubrindo nariz e boca

RETIRADA



A retirada efectúase dende as cintas ou as gomas, nunca se tocará a parte externa da máscara.

LEMBRA

Desbotala tras o uso no contenedor adecuado e hixieniza as túas mans

