



# MASCARETES AUTOFILTRANTS



EN 149:2001


## EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Eviten la inhalació d'aerosols que poden contindre agents biològics perillosos

**Protecció de fora cap a dins**



## COL.LOCACIÓ I AJUST

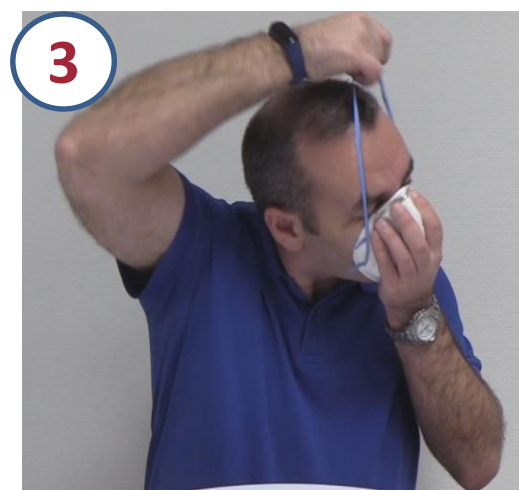

1	Abans de col.locar-te una mascareta, desinfecta correctament les teues mans i recorda que la cara deu estar neta, seca i lliure de pèls en la zona de contacte. <b>Subjecta la mascareta amb les cintes penjant cap avall.</b>
2	Subjecta la mascareta amb una ma. <b>Col.locant-la per baix de la barbata i per damunt del nas</b>
3	Subjecta la mascareta amb una ma i amb l'altra col.loca les bandes d'ajust
4	Col.loca la banda superior a l'altura de la coroneta i la inferior a l'altura del coll
5	Si existix, pressiona el clip d'ajust amb les dues mans fins que s'adapte bé al pont nasal
6	Realitza la comprovació d'ajust i estanquitat cobrint la mascareta amb las mans i exhalant. Si detectes fugues d'aire entre la cara i la mascareta reajusta-la.



# MASCARETES AUTOFILTRANTS



EN 149:2001


## EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Eviten la inhalació d'aerosols que poden contindre agents biològics perillosos

**Protecció de fora cap a dins**



## RETIRADA

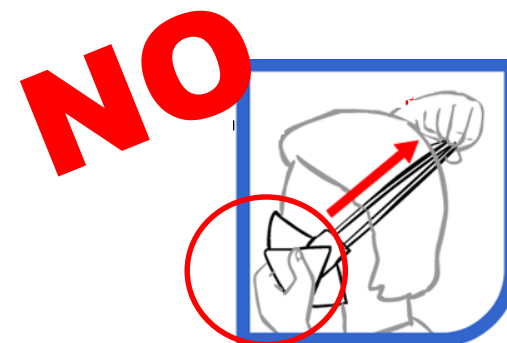

**NO TOQUES  
LA PEÇA FACIAL!**

<b>1</b>	En primer lloc lleva't la tira inferior situada en el coll
<b>2</b>	Passa la primera tira (inferior) per davant de la cara
<b>3</b>	Lleva't la segona tira col.locada en la coroneta
<b>4</b>	Passa la segona tira per davant de la cara. No hi ha que tocar la peça facial en cap moment i es rebutja com a residu contaminat
<b>5</b>	Realitza una correcta higiene de mans