



# MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

EN 149:2001 + A1:2010

## Eficacia de protección

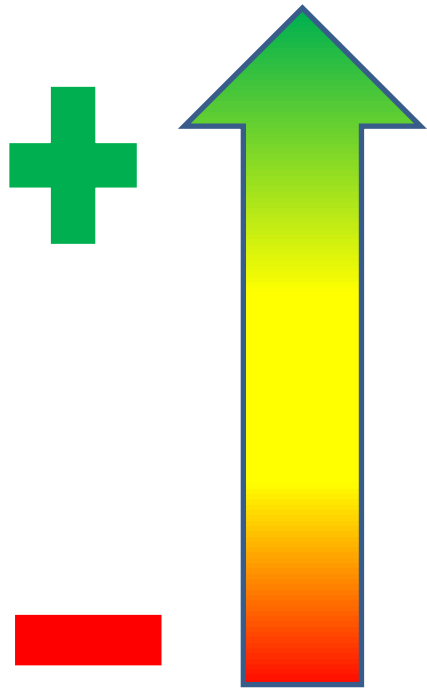

## Conoce el marcado de tu mascarilla

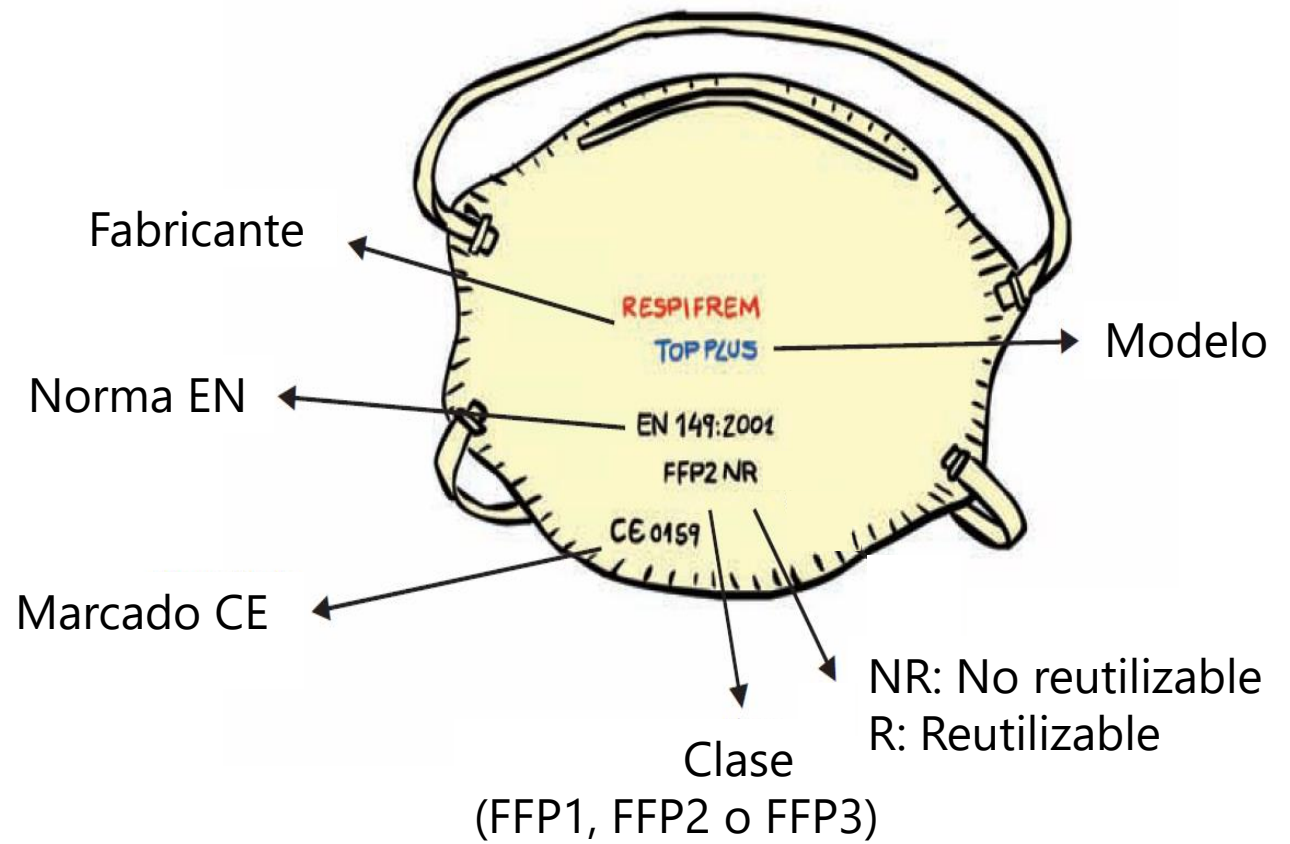

## Utiliza un modelo que se ajuste a tu cara



## Colócate la mascarilla conforme las instrucciones del fabricante



- 1: Ten el rostro limpio, seco y afeitado
- 2: Despliega o moldea la mascarilla
- 3: Pasa las dos gomas por detrás de tu cabeza
- 4: Asegúrate que no se crucen las gomas

- 5: Adapta la mascarilla al contorno de tu cara
- 6: Aprieta el clip nasal
- 7: Coloca las manos sobre la mascarilla, exhala profundamente y observa que el aire no escape por la zona de sellado.

## Recuerda que es necesario un buen afeitado en la zona de sellado



Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

